

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ.

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ЗАСТОСУВАННЯ.

ОПТИ-ФРІ®

Експресс.

багатоцільовий розчин

ТРИВАЛИЙ КОМФОРТ

ДОГЛЯД БЕЗ МЕХАНІЧНОЇ ОЧИСТКИ

АЛКОН®

ОПІС:

Багатоцільовий розчин ОПТИ-ФРІ® ЕКСПРЕСС® містить ПОЛІКВАД™ та АЛДОКС™, інгредієнти, що знищують шкідливі мікроорганізми, але є безпечними для ока. Він також містить цитрат, який усуває білкові відкладення на лінзах, протягом знаходження лінз у розчині.

Багатоцільовий розчин ОПТИ-ФРІ® ЕКСПРЕСС® забезпечує стійкий комфорт протягом всього дня, навіть для чутливих очей.

Багатоцільовий розчин ОПТИ-ФРІ® ЕКСПРЕСС® зволожує лінзи та усуває небажаний дискомфорт та подразнення, які можуть виникнути протягом носіння контактних лінз. Застосування ОПТИ-ФРІ® ЕКСПРЕСС® не потребує використання фізіологічного розчину.

Багатоцільовий розчин ОПТИ-ФРІ® ЕКСПРЕСС® призначений для дезінфекції, очищення, промивання, зволоження та зберігання всіх типів м'яких контактних лінз, включаючи силікон-гідрогелеві.

СКЛАД:

Багатоцільовий розчин ОПТИ-ФРІ® ЕКСПРЕСС® – це стерильний, буферний, ізотонічний водний розчин, який містить натрію хлорид, сорбіт, динатрію едетат, борну кислоту, амінометилпропанол, цитрат та ТЕТРОНІК™ 1304* (полоксамін) в якості інгредієнтів для очищення, а також ПОЛІКВАД™ (полідронію хлорид) 0.001% та АЛДОКС™ (миристамідопропілдиметиламін) 0.0005%.

ПРОТИПОКАЗАННЯ:

Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів багатоцільового розчину ОПТИ-ФРІ® ЕКСПРЕСС®.

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- Перед тим, як зняти або одягнути контактні лінзи, обов'язково вимийте руки. Щоб уникнути помилки, дотримуйтесь однакової послідовності: завжди спочатку беріть або ліву або праву лінзу.
- При використанні нового контейнеру для зберігання контактних лінз виробництва АЛКОН®, ополосніть його багатоцільовим розчином ОПТИ-ФРІ® ЕКСПРЕСС®, щоб усунути забруднення.
- Використаний розчин слід вилити з контейнера, ополоснити його багатоцільовим розчином ОПТИ-ФРІ® ЕКСПРЕСС® та дати йому висохнути. Рекомендується регулярно міняти контейнер для зберігання контактних лінз.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ, ДЕЗІНФЕКЦІЇ ТА УСУНЕННЯ БІЛКОВИХ ВІДКЛАДЕНИЙ:

Ополосніть кожну поверхню лінзи багатоцільовим розчином ОПТИ-ФРІ® ЕКСПРЕСС®. Наповніть контейнер виробництва АЛКОН® свіжим багатоцільовим розчином ОПТИ-ФРІ® ЕКСПРЕСС® так, щоб він повністю покривав лінзи. Залишіть лінзи у закритому контейнері на ніч або, як мінімум, на 6 годин. Перед застосуванням, ретельно промийте кожну поверхню лінзи, щоб видалити можливе забруднення.

Спеціаліст з контактної корекції може порадити додаткові засоби або інші заходи по догляду за лінзами в залежності від хімічного складу сльози та режиму носіння контактних лінз. Завжди дотримуйтесь порад спеціаліста з контактної корекції.

Ви можете зберігати лінзи у закритому контейнері протягом 30 днів, за умови, що Ви ними не користуєтесь. Якщо лінзи зберігаються протягом більш тривалого часу, вони повинні бути очищені та продезінфіковані свіжим розчином кожні 30 днів та безпосередньо перед використанням.

ЗВОЛОЖЕННЯ:

При виникненні незначного подразнення, дискомфорту або затуманення зору протягом носіння контактних лінз, закапайте 1-2 краплі багатоцільового розчину ОПТИ-ФРІ® ЕКСПРЕСС® безпосередньо в око та моргніть декілька разів. При необхідності багатоцільовий розчин ОПТИ-ФРІ® ЕКСПРЕСС® можна використовувати для зволоження очей протягом всього дня.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Завжди дотримуйтесь рекомендацій спеціаліста з контактної корекції та інструкцій для правильного застосування лінз та засобів догляду за контактними лінзами, включаючи контейнер. Якщо Ви відчуваєте постійний дискомфорт, надмірну сльозотечу, погіршення зору або почевоніння очей, **НЕГАЙНО** зніміть лінзи та зверніться до лікаря для попередження більш серйозних наслідків.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:

- Завжди використовуйте свіжий багатоцільовий розчин ОПТИ-ФРІ® ЕКСПРЕСС®. Не слід застосовувати розчин в контейнері повторно.
- Завжди використовуйте контейнер компанії АЛКОН.
- Для попередження забруднення, не слід торкатися кінчиком крапельниці флакона будь-якої поверхні.
- Закривайте флакон ковпачком після використання.
- Зберігайте при кімнатній температурі. Уникайте надмірного нагрівання.
- Зберігайте флакон щільно закритим.
- Не використовуйте розчин після кінцевого терміну придатності, зазначеного на упаковці.
- Не використовуйте розчин більше 6 місяців після першого відкриття флакона.
- Зберігайте в місцях, недоступних для дітей.
- Не використовувати для термічної дезінфекції.

УПАКОВКА:

Багатоцільовий розчин ОПТИ-ФРІ® ЕКСПРЕСС®, стерилізований шляхом фільтрації, постачається у пластикових флаконах об'ємом від 60 до 470 мл.

STERILE A

* ТЕТРОНІК - торгова марка корпорації BASF

Контейнер для зберігання контактних лінз виробництва компанії АЛКОН®.

©2013 Novartis

CE 0123

Alcon Laboratories, Inc.

6201 South Freeway

Fort Worth, Texas 76134-2099, США

EC REP

Alcon Laboratories (U.K.) Ltd.

Frimley Business Park

Frimley, Camberley

Surrey, GU16 7SR, United Kingdom

9009926-0013